

FLOCARE® INFINITY™ PUMPE

Enteral ernæringspumpe til både stationær og mobil brug.

Flocare® Infinity™ pumpen er markedets mindste, letteste og mest præcise enteralepumpe. Den er baseret på princippet om peristaltisk rotation og er beregnet til enteral brug. **Flocare® Infinity™** pumpen er klassificeret IPX5, hvilket betyder, at den kan rengøres under rindende vand. Dette forhindrer bakterievækst. Pumpen er udstyret med alarm.

Flocare® Infinity™ pumpen kan kun anvendes sammen med **Flocare® Infinity™** ernærings sæt.

Flocare® Infinity™ pumpen findes i 2 udgaver: **Flocare® Infinity™** og **Flocare® Infinity™+**.



TILBEHØR:



Flocare® Infinity™
Go rygsæk
til voksne



Flocare® Infinity™
Go Z-frame
til rygsæk



Flocare® Infinity™
Go rygsæk
til børn

VAREINFORMATION

	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® Infinity™ pumpe	35682	1 stk.
Flocare® Infinity™+ pumpe	35683	1 stk.
Flocare® Infinity™ Go rygsæk til voksne	35785	1 stk.
Flocare® Infinity™ Go Z-frame til rygsæk	35783	1 stk.
Flocare® Infinity™ Go rygsæk til børn	35786	1 stk.

FLOCARE® INFINITY™ PUMPE:

Indikation: Til administration af sondeernæring.

En enteral ernæringspumpe bør altid anvendes ved indgivelse af sondeernæring direkte i tyndtarmen, ved korttarmssyndrom og ved risiko for aspiration.

Ved diarre, kvalme/opkastning og nedsat mavekapacitet kan der med fordel anvendes ernæringspumpe til administration af sondeernæringen. Enteral ernæringspumpe anbefales også ved opstart af enteral ernæring, ved indgivelse af sondeernæring om natten og ved overgang til sondeernæring med høj energitæthed.

Forholdsregler: Flocare® Infinity™ pumpen kan kun anvendes til administration af enteral ernæring.

Vigtigt: Ved anvendelse af opblandede pulverblandinger skal man sikre, at blandingen er fuldstændig opløst og homogen, både før og under indgivelse af ernæringen. Dette er for at undgå eventuel ophobning af uopløste partikler, som kan hæmme pumpens ydeevne og dermed indgivelsen af sondeernæringen.

- Tekniske data:**
- Infusionshastighed 1-400 ml/timen i 1 ml intervaller
 - Mulighed for angivelse af maksimal dosis (op til 4000 ml)
 - **Flocare® Infinity™+** pumpen har endvidere bolusprogram med mulighed for infusionshastighed op til 600 ml/timen og angivelse af bolusinterval
 - Automatisk free-flow beskyttelse
 - Automatisk fyldning af ernæringssæt
 - Husker indstillinger og værdier. Kan nulstilles
 - 24 timers batterilevetid (ved 125 ml/timen)
 - Stort LCD display med selvforklarende informationer
 - Audio og visuelle alarmer og justerbar lydstyrke
 - Størrelse: 14 x 9,5 x 3,5 cm, vægt: 392 g
 - Nøjagtighed +/- 5%
 - **Må kun anvendes sammen med Flocare® Infinity™ ernæringssæt**

Med pumpen følger en flersproget brugervejledning og quickguide.

Se også www.nutriciaflocare.com som giver information, råd og vejledning om Flocare® Infinity™ pumpen samt interaktiv undervisning i brugen af pumpen.

FLOCARE® INFINITY™ pumperne opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.